

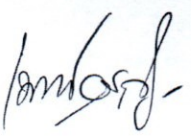
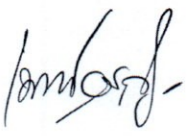



วิธีปฏิบัติงาน  
เรื่อง


การตรวจหาระดับ Calcium (Arsenazo III)

โดยเครื่อง AU680 /DxC700AU

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จัดเตรียมเอกสารโดย	ตรวจสอบเอกสารโดย	อนุมัติใช้เอกสารโดย
		
(ทนาย.เบญจมาศ อรุณพาส) นักเทคนิคการแพทย์	(ทนาย.เบญจมาศ อรุณพาส) ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	(ทนาย.เบญจพร แก้วคำใต้) ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์

เลขที่เอกสาร	แก้ไขครั้งที่	สำเนาฉบับที่	วันที่เริ่มใช้
MSUH-WI-LAB-084	00		1 สิงหาคม 2562

	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	<b>วิธีปฏิบัติงาน</b> เรื่อง : การตรวจหาระดับ Calcium (Arsenazo III) โดยเครื่อง AU680 /DxC700AU	เอกสารเลขที่ MSUH-WI-LAB-084	หน้า 1 จาก 9
		แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2562
	ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์		


การควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ

แก้ไข ครั้งที่	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้ขอแก้ไข	ผู้อนุมัติ การแก้ไข	วันที่เริ่มใช้ เอกสารฉบับ แก้ไข

บัญชีรายชื่อผู้ถือครอง


สำเนาฉบับที่	หน่วยงาน	ชื่อผู้ถือครอง	ตำแหน่ง



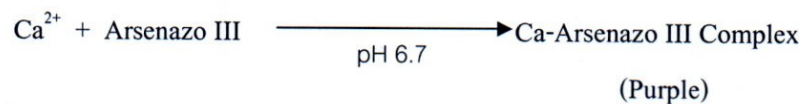
	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	วิธีปฏิบัติงาน	เอกสารเลขที่	หน้า 2 จาก 9
	เรื่อง : การตรวจหาระดับ Calcium (Arsenazo III) โดยเครื่อง AU680 /DxC700AU	MSUH-WI-LAB-084	
		แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2562
ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์		
ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์		

**การตรวจหาระดับ Calcium (Arsenazo III) โดยเครื่อง AU480/AU680/AU5800/DxC700AU**

<b>วัตถุประสงค์</b>	เพื่อให้ นักเทคนิคการแพทย์สามารถตรวจหาระดับ Calcium โดยเครื่อง AU480/AU680/AU5800/DxC700AU ได้อย่างถูกต้อง
<b>ขอบข่าย</b>	นักเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติการในหน่วยเคมีคลินิก
<b>คำจำกัดความ</b>	CA = Calcium
<b>เอกสารอ้างอิง</b>	AU System(s) : Clinical Chemistry Reagent Guide (Version.15, Revision date: 2012-01)
<b>รายละเอียด</b>	<p><b>1. วัตถุประสงค์การตรวจวิเคราะห์ (Purpose of the examination)</b></p> <p>การตรวจวัดระดับ Calcium ถูกใช้ในการวินิจฉัยและการรักษาในโรค Parathyroid โรคกระดูก โรคไต (Chronic renal disease) โรคนิ่ว (Urolithiasis) และ อาการทำงานผิดปกติของกล้ามเนื้อ (Tetany)</p> <p>Calcium ในซีรัมประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Free form หรือ ionized calcium</li> <li>2. Protein bound calcium มีประมาณ 50% ส่วนใหญ่จะเป็น Protein ชนิด Albumin มีส่วนน้อยที่เป็น globulin</li> <li>3. Complex-bound calcium กับ Phosphate , citrate , bicarbonate พบประมาณ 45%</li> </ol> <p>Ionized calcium เป็น form ที่สำคัญต่อกระบวนการทางชีวภาพ แต่การตรวจวัดโดยตรงทำได้ยาก Calcium ions เป็น ion ที่สำคัญในการส่งกระแสประสาท และยังเป็น Cofactor ของปฏิกิริยาเอนไซม์หลายๆชนิด เป็นตัวที่ช่วยรักษาการหดตัวของกล้ามเนื้อ กระบวนการแข็งตัวของเลือด</p> <p><b>2. หลักการและวิธีการในการวิเคราะห์ (Principle of the procedure used for examination)</b></p>

	<b>โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</b>		
	<b>วิธีปฏิบัติงาน</b> เรื่อง :การตรวจหาระดับ Calcium (Arsenazo III) โดยเครื่อง AU680 /DxC700AU	เอกสารเลขที่ <b>MSUH-WI-LAB-084</b>	หน้า 3 จาก 9
<b>ผู้จัดทำ :</b> ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	<b>แก้ไขครั้งที่</b> 00	<b>วันที่เริ่มใช้</b> 1 สิงหาคม 2562	
<b>ผู้ตรวจสอบ :</b> ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส <b>ผู้จัดการวิชาการ</b> งานเทคนิคการแพทย์	<b>หน่วยงาน :</b> งานเทคนิคการแพทย์		
	<b>ผู้อนุมัติ :</b> ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ <b>ผู้จัดการคุณภาพ</b> งานเทคนิคการแพทย์		

นํ้ายาตรวจวิเคราะห์ Calcium ใช้หลักการ Endpoint Method โดย Calcium ในตัวอย่างตรวจจะทำปฏิกิริยากับ Arsenazo III เกิดเป็นสารที่มีสีม่วงแดง วัดค่าการดูดกลืนแสงแบบ Bichromatics ที่ 660/700 นาโนเมตร ค่าการดูดกลืนแสงที่เพิ่มขึ้นจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นในตัวอย่างตรวจ ตามสมการเคมี ดังนี้



### 3. รายละเอียดเพิ่มเติมในการทำ (Performance specifications)

#### - Method Comparison / Equivalency

เปรียบเทียบตัวอย่างตรวจ Serum คนไข้ ด้วยนํ้ายา Calcium OSR61117 บนเครื่อง AU640 เปรียบเทียบกับ Calcium OSR6176 ได้ผล Linear regression ดังนี้

$y = 1.003x + 0.015$	$r = 0.999$	$n = 105$	Sample range = 1.03 – 3.83 mmol/L
----------------------	-------------	-----------	-----------------------------------


เปรียบเทียบตัวอย่างตรวจ Urine คนไข้ด้วยนํ้ายา Calcium OSR61117 บนเครื่อง AU640 เปรียบเทียบกับ Calcium OSR6176 ได้ผล Linear regression ดังนี้

$y = 1.000x + -0.038$	$r = 0.999$	$n = 94$	Sample range = 0.50 – 9.62 mmol/L
-----------------------	-------------	----------	-----------------------------------

#### - ความแม่นยำ (Precision)

ทดสอบความแม่นยำจาก 3 serum pools บนเครื่อง AU2700 โดยการทำมากกว่า 20 วัน ได้ผลดังนี้



	<b>โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</b>		
	<b>วิธีปฏิบัติงาน</b> เรื่อง :การตรวจหาระดับ Calcium (Arsenazo III) โดยเครื่อง AU680 /DxC700AU	<b>เอกสารเลขที่</b> MSUH-WI-LAB-084	หน้า 4 จาก 9
<b>ผู้จัดทำ :</b> ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	<b>แก้ไขครั้งที่</b> 00	<b>วันที่เริ่มใช้</b> 1 สิงหาคม 2562	
<b>ผู้ตรวจสอบ :</b> ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส <b>ผู้จัดการวิชาการ</b> งานเทคนิคการแพทย์	<b>หน่วยงาน :</b> งานเทคนิคการแพทย์ <b>ผู้อนุมัติ :</b> ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ <b>ผู้จัดการคุณภาพ</b> งานเทคนิคการแพทย์		

n = 80	Within Run		Total	
Mean mmol/L	SD	CV%	SD	CV%
1.61	0.01	0.57	0.02	0.95
2.52	0.02	0.65	0.03	0.96
4.19	0.02	0.48	0.04	0.94

ทดสอบความแม่นยำจาก 3 urine pools บนเครื่อง AU2700 โดยการทำมากกว่า 20 วัน ได้ผลดังนี้

n = 80	Within Run		Total	
Mean mmol/L	SD	CV%	SD	CV%
0.11	0.00	2.05	0.00	2.60
5.52	0.06	1.00	0.07	1.21
9.33	0.10	1.09	0.13	1.40

#### Linearity

Serum/Plasma = 4 – 20 mg/dL (1-5 mmol/L)

Urine = 0 – 40 mg/dL (0-10 mmol/L)

#### Sensitivity

ค่าต่ำสุดที่วัดได้บนเครื่อง AU640 = 0.04 mg/dL (0.01 mmol/L)


#### 4. ตัวอย่างถึงส่งตรวจปฐมภูมิ (Primary sample system)

Serum และ Plasma (Heparinised plasma) ห้ามใช้สารกันเลือดแข็งชนิด EDTA, Sodium Citrate, Sodium Fluoride หรือ Oxalate

เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8°C ได้นาน 3 สัปดาห์ และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-25°C ได้นาน 7 วัน

Urine ให้เก็บด้วยขวดที่บรรจุ Acidified with 6M HCl. เก็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง

เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8°C ได้นาน 4 วัน และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-25°C ได้นาน 2 วัน

	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	วิธีปฏิบัติงาน	เอกสารเลขที่	หน้า 5 จาก 9
	เรื่อง : การตรวจหาระดับ Calcium (Arsenazo III) โดยเครื่อง AU680 /DxC700AU	MSUH-WI-LAB-084	
		แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2562
ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์		
ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์		

**5. ชนิดของภาชนะที่ใช้บรรจุสิ่งส่งตรวจและสารที่เติมเพื่อรักษาสภาพสิ่งส่งตรวจ  
(Type of container and additives)**

**6. เครื่องมือของห้องปฏิบัติการที่จำเป็นและน้ำยา (Required equipment and reagents)**

6.1 เครื่องอัตโนมัติ AU480/AU680/AU5800

6.2 น้ำยาตรวจวิเคราะห์ Calcium

การเตรียมน้ำยา

Calcium เป็นน้ำยาที่พร้อมใช้งาน

การจัดเก็บและเสถียรภาพ

น้ำยาที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8°C จะมีอายุถึงวันที่ระบุไว้

น้ำยาที่เปิดใช้งานแล้วและอยู่ในตู้เย็นน้ำยาของเครื่อง จะมีอายุหลังเปิดใช้งาน 90 วัน

น้ำยา Calcium ประกอบด้วย

Imidazole (pH 6.9)

Arsenazo III 0.1 – 0.2%

Triton X-100

Preservative


6.3 เครื่อง Centrifuge

6.4 สารมาตรฐาน

System Calibrator Cat. No. 66300 สำหรับการตรวจวิเคราะห์ Magnesium ใน Serum

Urine Calibrator Cat. No. ODC0025 สำหรับการตรวจวิเคราะห์ Magnesium ใน Urine



	<b>โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</b>		
	<b>วิธีปฏิบัติงาน</b> <b>เรื่อง : การตรวจหาระดับ Calcium</b> <b>(Arsenazo III) โดยเครื่อง AU680</b> <b>/DxC700AU</b>	<b>เอกสารเลขที่</b> <b>MSUH-WI-LAB-084</b>	<b>หน้า 6 จาก 9</b>
<b>ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส</b>	<b>แก้ไขครั้งที่ 00</b>	<b>วันที่เริ่มใช้</b> <b>1 สิงหาคม 2562</b>	
<b>ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส</b> <b>ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์</b>	<b>หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์</b>		
	<b>ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้</b> <b>ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์</b>		

ค่า Calcium ใน System Calibrator และ Urine Calibrator แสดง traceability ตามมาตรฐาน National Institute of Standards and Technology (NIST) Standard Reference Material (SRM) 909b Level 1

วิธีการเตรียมสารมาตรฐาน

System Calibrator Cat. No. 66300


1. ก่อนเปิดฝาควรตั้งขวดทิ้งไว้ให้หายเย็นที่อุณหภูมิห้อง
2. เคาะฝาขวดก่อนเปิด แล้วเปิดฝาอย่างระมัดระวัง
3. ใช้ Volumetric pipette ดูด Sterile deionised water ที่มีอุณหภูมิประมาณ 20°C ปริมาตร 5.0 mL ใส่ลงในขวด System Calibrator
4. Mix แบบ invert 3 ครั้ง แล้วตั้งทิ้งไว้ 10 นาที จากนั้นให้ mix เบาๆ บน Roller นาน 30 นาที ห้ามเขย่าขวดเพราะอาจทำให้เกิดฟอง
5. Mix ต่อไปจนกว่าสารจะละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
6. บันทึกวันที่เตรียมบนฉลากขวด

Urine Calibrator Cat. No. ODC0025 เป็นของเหลวที่พร้อมใช้งาน

การจัดเก็บและเสถียรภาพของสารมาตรฐาน

System Calibrator Cat. No. 66300

- System Calibrator ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8°C จะมีอายุถึงวันที่ระบุไว้
- System Calibrator ที่เตรียมแล้ว สามารถจัดเก็บได้ทั้งที่ -20°C และ 2-8 °C โดยสารแต่ละตัวจะมีอายุตามระบุในตาราง

	<b>โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</b>		
	<b>วิธีปฏิบัติงาน</b> เรื่อง : การตรวจหาระดับ Calcium (Arsenazo III) โดยเครื่อง AU680 /DxC700AU	<b>เอกสารเลขที่</b> MSUH-WI-LAB-084	<b>หน้า 7 จาก 9</b>
<b>ผู้จัดทำ :</b> ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	<b>แก้ไขครั้งที่ 00</b>	<b>วันที่เริ่มใช้</b> 1 สิงหาคม 2562	
<b>ผู้ตรวจสอบ :</b> ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส <b>ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์</b>	<b>หน่วยงาน :</b> งานเทคนิคการแพทย์		
	<b>ผู้อนุมัติ :</b> ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ <b>ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์</b>		

	-20°C *	2...8°C
Alkaline Phosphatase, ALT, AST, Amylase, Cholinesterase, CK-NAC, GGT, HBDH, LDH	<b>Not recommended</b>	<b>8 hours</b>
Albumin, Creatinine, Cholesterol, Glucose, Lactate, Lipase, Total Protein, Triglyceride, UIBC, Urea, Unc Acid, ** Bilirubin, *** Inorganic Phosphorous	<b>1 month</b>	<b>30 hours</b>
Calcium, Iron, Magnesium	<b>1 month</b>	<b>1 week</b>

\* When frozen once.

Urine Calibrator Cat. No. ODC0025

- Urine Calibrator ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานและเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 °C จะมีอายุถึงวันที่ระบุไว้ (ห้ามแช่แข็ง)
- Urine Calibrator ที่เปิดใช้งานและเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 °C จะมีอายุหลังเปิดใช้งาน 60 วัน

## **7. การสอบเทียบ (Calibration procedures)**

- 7.1 ใช้ System Calibrator รหัส 66300 และ Urine Calibrator รหัส ODC0025
- 7.2 ทำการ Calibrate เมื่อเปลี่ยนใช้น้ำยา Lot ใหม่, เมื่อค่า Control ผิดปกติ, เมื่อมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำคัญ


## **8. ขั้นตอนกระบวนการ (Procedural steps)**

ขั้นตอนและรายละเอียดวิธีการใช้เครื่อง AU480/AU680/AU5800 ให้ปฏิบัติตามการใช้และการบำรุงรักษาเครื่อง AU480/AU680/AU5800

## **9. วิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality control procedures)**

- 9.1 ใช้สารควบคุมคุณภาพ รหัส ODC0003 และ ODC0004 สำหรับการตรวจวิเคราะห์ใน Serum และ Control อื่นๆ สำหรับการตรวจวิเคราะห์ใน Urine
- 9.2 ทำการทดสอบคุณภาพภายในทุกวันที่มีการตรวจวัดคนไข้ หรือทุกครั้งที่ทำ Calibration



	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	<b>วิธีปฏิบัติงาน</b> เรื่อง : การตรวจหาระดับ Calcium (Arsenazo III) โดยเครื่อง AU680 /DxC700AU	เอกสารเลขที่ MSUH-WI-LAB-084	หน้า 8 จาก 9
	แก้วไขครั้งที่ 00	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2562	
ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์		
ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์		

### 10. สิ่งหรือปัจจัยรบกวน (Interferences)

#### การศึกษาในSerum

Icterus: Interference less than 3% up to 40 mg/dL or 684  $\mu$ mol/L bilirubin

Haemolysis: Interference less than 3% up to 5.0 g/L haemoglobin

Lipemia: Interference less than 10% up to 1000 mg/dL Intralipid®

Magnesium: Interference less than 10% up to 4 mmol/L magnesium

#### การศึกษาในUrine

Ascorbate : Interference less than 3% up to 50 mg/dL ascorbate

Magnesium: Interference less than 3% up to 4 mmol/L magnesium

### 11. หลักการในการคำนวณและค่าความไม่แน่นอน (Principle of procedure for calculating results, including measurement uncertainty)

เครื่องวิเคราะห์จะคำนวณระดับของสารในแต่ละสารตัวอย่างโดยอัตโนมัติ ค่าความไม่แน่นอนให้ดูรายละเอียดในเอกสารเรื่องการคำนวณหาค่าความไม่แน่นอนของการวัดเชิงปริมาณ


### 12. ค่าอ้างอิง (Biological reference intervals)

#### Serum or Plasma

Adults 2.20 – 2.65 mmol/L(8.8 – 10.5 mg/dL)

Children (0 -10 Days) 1.90 – 2.60 mmol/L(7.6 – 10.4 mg/dL)

Children (10 Days -24 Months) 2.25 – 2.75 mmol/L(9.0 – 11.0 mg/dL)

	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสarakam		
	วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง : การตรวจหาระดับ Calcium (Arsenazo III) โดยเครื่อง AU680 /DxC700AU	เอกสารเลขที่ MSUH-WI-LAB-084	หน้า 9 จาก 9
		แก้วไขครั้งที่ 00	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2562
	ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์		

Urine 24h

Female < 6.2 mmol/L (250 mg)

Male < 7.5 mmol/L (300 mg)