
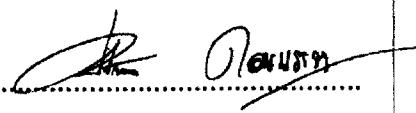
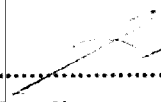





วิธีปฏิบัติงาน
เรื่อง

การตรวจสอบการทำให้ปราศเชื้อด้วยหลอดทดสอบ

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จัดเตรียมเอกสารโดย	ตรวจสอบเอกสารโดย	อนุมัติใช้เอกสารโดย
 (นางสาวศิริลักษณ์ อรรคแสง) 1 มีนาคม 2564	 (นางปาริชาติ ดอนบรรจง) หัวหน้างานจ่ายกลาง 1 มีนาคม 2564	 (แพทย์หญิงสุกัญญา ชูคันหอม) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 5 มี.ค. 2564

เลขที่เอกสาร	แก้ไขครั้งที่ : 00	สำเนาฉบับที่	วันที่เริ่มใช้
SDVH-WI-CSSD-006	-/-/-		15 มีนาคม 2564

	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	วิธีปฏิบัติงาน	เอกสารเลขที่	หน้า 1 จาก 5
	เรื่อง : การตรวจสอบการทำให้ปราศ เชื้อด้วยหลอดทดสอบ	SDVH-WI-CSSD-006	วันที่เริ่มใช้
		แก้ไขครั้งที่ : 00 --/--/--	15 มีนาคม 2564
ผู้จัดทำ : นางสาวศิริลักษณ์ อรรคแสง	หน่วยงาน : งานจ่ายกลาง		
ผู้ตรวจสอบ : นางปาริชาติ ดอนบรรจง หัวหน้างานจ่ายกลาง	ผู้อนุมัติ : แพทย์หญิงสุกัญญา ชูคันหอม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายพัฒนาคุณภาพ		

1. วัตถุประสงค์

- เป็นข้อบ่งชี้ทำให้มั่นใจว่าชุดอุปกรณ์เครื่องมือที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อไม่มีจุลชีพที่มีชีวิตเหลืออยู่และเพื่อให้ตรวจสอบความผิดพลาด ให้เร็วที่สุด ที่สุดก่อนนำไปใช้

2. ขอบข่าย

การตรวจสอบการปราศจากเชื้อ ด้วยหลอดทดสอบ ใช้กับการตรวจสอบ อุปกรณ์ที่ผ่านการปราศจากเชื้อ ซึ่งเป็นหลักการตรวจสอบทางชีวภาพ และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ การทำปราศจากเชื้อ

3. ผู้รับผิดชอบ


- บุคลากร งานจ่ายกลาง / บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นี้ อุปกรณ์และ ต. ตรวจสอบผลตรวจสอบทางชีวภาพ

4. อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้

- 4.1. หลอดทดสอบชีวภาพ แบบไม่เกิน 3 ชั่วโมง เช่น 3M Attest Rapid Readout Biological Indicator โดยมีหลอดทดสอบ 3 ชั่วโมง (ฝาสีน้ำตาล) ทึบห่อสีเขียว หรือ ตามมาตรฐานของหลอดที่ผลิต (IFU)
- 4.2. หลอดทดสอบชีวภาพ แบบไม่เกิน 1 ชั่วโมง เช่น 3M Attest Super Rapid Readout Biological Indicator แบบ 1 ชั่วโมง (ฝาสีขาว) บรรจุทึบห่อสีขาว หรือ ตามมาตรฐานของหลอดที่ผลิต (IFU)
- 4.3. เครื่องอ่านเชื้อ หรือ Auto-reader attest รุ่น 1292 ที่ใช้ร่วมกับ 3M Attest Rapid Readout Biological
- 4.4. เครื่องอ่านเชื้อ หรือ Auto-reader รุ่น 490 ใช้ร่วมกับ หลอดตรวจสอบทางชีวภาพ 3MTM AttestTM 1492V Super Rapid Readout Biological Indicator ฝาสีน้ำตาล
- 4.5. แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบ

5. คำจำกัดความ

เป็นวิธีการตรวจสอบการทำให้ปราศจากเชื้อที่เชื่อถือได้มากที่สุด และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง วิธีการตรวจสอบใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biological indicator) ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่า spore test ใช้สปอร์ของเชื้อ Bacillus ที่ยังมีชีวิตซึ่งเชื่อนี้มีความคงทนกว่าเชื้อจุลชีพอื่น ๆ และไม่ก่อโรคเป็นตัวชี้วัด หากสปอร์ของเชื่อนี้ถูกทำลายย่อยมชี้ให้เห็นว่า เชื้อจุลชีพอื่น ๆ จะถูกทำลายระหว่างอยู่ในกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่ใช้สำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำใช้สปอร์ของเชื้อ Bacillus stearothermophilus สำหรับเครื่องอบแก๊ส Ethylene oxide และเครื่องอบความร้อน ใช้สปอร์ ของเชื้อ Bacillus subtilis

	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	วิธีปฏิบัติงาน	เอกสารเลขที่	หน้า 2 จาก 5
	เรื่อง : การตรวจสอบการทำให้ปราศ เชื้อด้วยหลอดทดสอบ	SDVH-WI-CSSD-006	วันที่เริ่มใช้
		แก้ไขครั้งที่ : 00 --/--/--	15 มีนาคม 2564
ผู้จัดทำ : นางสาวศิริลักษณ์ อรรคแสง	หน่วยงาน : งานจ่ายกลาง		
ผู้ตรวจสอบ : นางปาริชาติ ดอนบรรจง หัวหน้างานจ่ายกลาง	ผู้อนุมัติ : แพทย์หญิงสุกัญญา ชูคันหอม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายพัฒนาคุณภาพ		

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การเตรียมตรวจสอบ
2. การทดสอบ
3. การอ่านผล

7. รายละเอียดการปฏิบัติงาน

7.1. ขั้นตอนการเตรียม


- 7.1.1.เตรียมชุดอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ต้องการทำการทดสอบ
- 7.1.2.เตรียมหลอดทดสอบ (Attest test) ตรวจสอบ ล็อตที่ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต และหมดอายุ
- 7.1.3.ตรวจสอบสภาพเครื่องอุ่นเชื้อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
- 7.1.4.ตรวจสอบทุกรอบที่มีการนึ่งอุปกรณ์ที่ เป็น Critical item

7.2. การทดสอบ

- 7.2.1.นำท่อทดสอบ ทางชีวภาพ เข้านึ่งรอบเดียวกับที่ต้องทดสอบ
- 7.2.2.เมื่อการนึ่งเสร็จสมบูรณ์ นำหลอดทดสอบออกจากหีบห่อ และกรณีเป็นหลอดทดสอบ 3 ชั่วโมงให้ นำหลอด ทดสอบ บีบหลอดด้วยเครื่อง (Ampoule Crusher) ให้เชื้อผสม เข้ากับอาหารเลี้ยงเชื้อ
- 7.2.3. นำหลอดทดสอบและหลอดควบคุมที่เป็น ล็อตผลิตเดียวกัน ใส่ในช่องบ่มเชื้อ (Growth Chamber) โดยช่องที่เป็นหลอดเชื้อที่ไม่ได้ผ่านการนึ่งถือเป็นหลอดควบคุม และหลอดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เป็นหลอดทดสอบ
- 7.2.4.อุ่นเชื้อ 1 ชั่วโมงหรือ 3 ชั่วโมง ตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ (IFU)

7.3. การอ่านผล

- 7.3.1.เมื่อครบเวลาอ่านผลนำหลอดทดสอบอ่านผลควบคู่กับหลอดทดสอบ ควบคุม
- 7.3.2.อ่านผลหลอดทดสอบควบคุม ซึ่งไม่ได้ผ่านกระบวนการนึ่งให้ปราศจากเชื้อจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของสีน้ำเลี้ยงเชื้อจากเดิมสีน้ำเลี้ยงเชื้อเป็นสีม่วง จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองซี จะบ่งชี้ได้ว่าผลการตรวจสอบ เป็นบวกคือเชื้อโรคไม่ตาย
- 7.3.3.อ่านผลหลอดทดสอบที่ผ่านการนึ่งทำให้ปราศจากเชื้อ การเปลี่ยนแปลงของสีน้ำเลี้ยง เชื้อ จะต้องยังคงสภาพสีม่วงเหมือนเดิมให้ผลเป็นลบ จะเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าชุดอุปกรณ์เครื่องมือที่ทำการนึ่งนั้นผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อจุลชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	วิธีปฏิบัติงาน	เอกสารเลขที่	หน้า 3 จาก 5
	เรื่อง : การตรวจสอบการทำให้ปราศ เชื้อด้วยหลอดทดสอบ	SDVH-WI-CSSD-006	วันที่เริ่มใช้
		แก้ไขครั้งที่ : 00 --/--/--	15 มีนาคม 2564
ผู้จัดทำ : นางสาวศิริลักษณ์ อรรคแสง	หน่วยงาน : งานจ่ายกลาง		
ผู้ตรวจสอบ : นางปาริชาติ ดอนบรรจง หัวหน้างานจ่ายกลาง	ผู้อนุมัติ : แพทย์หญิงสุกัญญา ชูคันหอม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายพัฒนาคุณภาพ		

- 7.3.4.อ่านผลในกรณีที่ หลอดทดสอบที่ผ่านการนึ่งทำให้ปราศจากเชื้อให้ผลเป็นบวม มีการเปลี่ยนแปลงของสีน้ำเลี้ยงเชื้อจากเดิมสีม่วงเปลี่ยนเป็นสีเหลือง จะเป็นการบ่งชี้ได้ว่าชุดอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทำการนึ่งนั้น มีการผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ
- 7.3.5.บันทึก วันที่ เดือน พ.ศ. เวลาที่อ่านเชื้อและครบอ่านผลพร้อมบันทึกผู้ทดสอบ / ผู้ตรวจสอบ
- 7.3.6. เมื่อผลอ่านเป็นลบ จึงจะนำอุปกรณ์ แจกจ่ายต่อไป
- 7.3.7. กรณีที่ผลการตรวจสอบยังไม่ออก แต่ต้องมีการใช้อุปกรณ์ ต้องได้รับการเซ็นยืนยันการเบิก อุปกรณ์ จากแพทย์ที่ใช้งานโดยใช้แบบฟอร์ม แบบบันทึกความเสี่ยงในการใช้เครื่องมือ (SDVH-FM-CSSD-001)

8. เกณฑ์ชี้วัด

อัตราการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อผ่านเกณฑ์ 100%


9. เอกสารอ้างอิง

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย. 2561. แนวปฏิบัติการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือแพทย์. กรุงเทพฯ


อะเคื่อ อุณหเลขกะ .2544. การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล. โรงพิมพ์มิ่งเมือง. เชียงใหม่.
อะเคื่อ อุณหเลขกะ.2554.หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล.บริษัท มิ่งเมือง
นวรรตน์ จำกัด.เชียงใหม่.

WWW. cdc.gov


<http://www.cssd-gotoknow.org/2014/12/monitoring-of-sterilization.html>

	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง : การตรวจสอบการทำให้ปราศ เชื้อด้วยหลอดทดสอบ	เอกสารเลขที่ SDVH-WI-CSSD-006	หน้า 4 จาก 5
		แก้ไขครั้งที่ : 00 --/--	วันที่เริ่มใช้ 15 มีนาคม 2564
	ผู้จัดทำ : นางสาวศิริลักษณ์ อรรคแสง	หน่วยงาน : งานจ่ายกลาง	
ผู้ตรวจสอบ : นางปาริชาติ ดอนบรรจง หัวหน้างานจ่ายกลาง	ผู้อนุมัติ : แพทย์หญิงสุกัญญา ชูคันหอม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายพัฒนาคุณภาพ		


10.ภาคผนวก

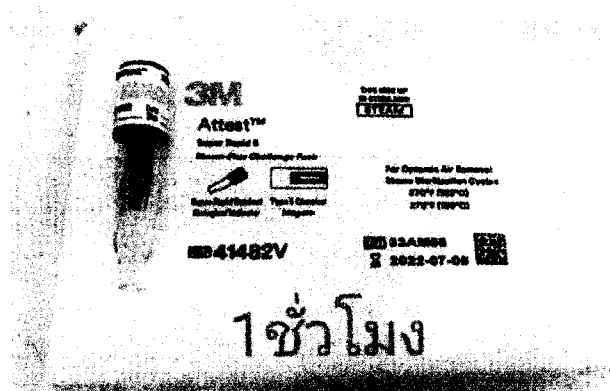

- หลอดทดสอบชนิดไม่เกิน 1 ชั่วโมง

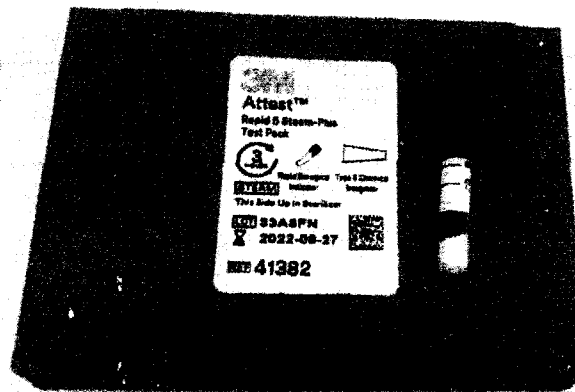

- หลอดทดสอบชนิดไม่เกิน 3 ชั่วโมง

	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	วิธีปฏิบัติงาน	เอกสารเลขที่	หน้า 5 จาก 5
	เรื่อง : การตรวจสอบการทำให้ปราศ เชื้อด้วยหลอดทดสอบ	SDVH-WI-CSSD-006	วันที่เริ่มใช้
		แก้ไขครั้งที่ : 00 --/--	15 มีนาคม 2564
ผู้จัดทำ : นางสาวศิริลักษณ์ อรรคแสง	หน่วยงาน : งานจ่ายกลาง		
ผู้ตรวจสอบ : นางปาริชาติ ดอนบรรจง หัวหน้างานจ่ายกลาง	ผู้อนุมัติ : แพทย์หญิงสุกัญญา ชูคันหอม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายพัฒนาคุณภาพ		



เครื่องอ่านเชื้อ Auto-reader 490



เครื่องอ่านเชื้อ Auto-reader 290

คำร้องขอขึ้นทะเบียน ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกเอกสารคุณภาพ

ส่วนที่ 1 ผู้เสนอขอ

เลขที่

วันที่เสนอ = 1 มี.ค. 2564

ทีม/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

งานจ่ายกลาง

เรื่อง ขอขึ้นทะเบียนเอกสารคุณภาพ ขอปรับปรุงแก้ไขข้อความในเอกสารคุณภาพ ขอยกเลิกเอกสารคุณภาพ

ประเภทเอกสารคุณภาพ คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) เอกสารสนับสนุน (Support Document)

ระเบียบปฏิบัติ (System Procedure) แบบฟอร์ม (Form)

วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction)

เอกสารคุณภาพเรื่อง การตรวจสอบการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยหลอดทดสอบ

รหัสเอกสารคุณภาพ SDVH- WI-CSSD-006

แก้ไขครั้งที่ 00

วันที่บังคับใช้

15 มีนาคม 2564

เหตุผลในการจัดทำ

- กรณีที่เป็นเอกสารคุณภาพขึ้นทะเบียนใหม่ ได้ส่งเอกสารคุณภาพใหม่ พร้อมไฟล์ข้อมูลมาด้วย
- กรณีที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิกเอกสารคุณภาพที่เคยทำแล้ว ได้ส่งเอกสารเดิมพร้อมกับเอกสารที่จัดทำขึ้นใหม่มาด้วย

- ประสงค์ให้เผยแพร่เอกสารคุณภาพ
- ไม่ประสงค์ให้เผยแพร่เอกสารคุณภาพ

ลงชื่อ  ผู้เสนอขอ

(น.ส. สิริลักษณ์ อรรถาภิษฐ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างาน ไซคมร พยาบาล

ส่วนที่ 2 ผู้ทบทวน

- เห็นชอบให้จัดทำเอกสาร ดำเนินการขออนุมัติ
- ไม่เห็นชอบ ส่งคืนผู้จัดทำ

เหตุผลและข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้งานคุณภาพดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางปาริชาติ ดอนบรรจง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานจ่ายกลาง

วันที่ 1 มี.ค. 2564

ส่วนที่ 3 ผู้อนุมัติ

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ

เหตุผลและข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้งานคุณภาพดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(แพทย์หญิงสุกัญญา ชูคันหอม)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ

วันที่ 15 มี.ค. 2564

ส่วนที่ 4 ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ

ลายมือชื่อ	ลายมือชื่อ	ลายมือชื่อ	ลายมือชื่อ	ลายมือชื่อ
1	13	25	37	49
2	14	26	38	50
3	15	27	39	51
4	16	28	40	52
5	17	29	41	53
6	18	30	42	54
7	19	31	43	55
8	20	32	44	56
9	21	33	45	57
10	22	34	46	58
11	23	35	47	59
12	24	36	48	60

